



Information

Quantiferon TB plus Test

i Allgemeines

1. Die Einsendung der Probe kann **zwischen Montag und Donnerstag** erfolgen, sofern der Folgetag **kein Feiertag** ist.
2. Sie finden die Analyse im Anforderungsprogramm unter dem **Kürzel QF-TB**
3. Voraussetzung für die **Kostenübernahme** durch die ÖGK Krankenkassen:
 - a. **Kassendiagnose:** „Vor Behandlungsbeginn mit Medikamenten, für die ein Ausschluss TB erforderlich ist (z.B. Biologica)“, „Therapieentscheidung bei HIV-Infektion“, „Vor Dialyse bei CKD“, „Vor Organtransplantation“, „Ausschluss Kreuzreaktion BCG“, „V.a. TB bei Anergie“, „Schwangerschaft – rezente TB-Infektion“, „Schwangerschaft – Immunsuppression“, „Schwangerschaft – HIV Infektion“
 - b. **Nur auf Zuweisung von Fachärztinnen/-ärzten für Innere Medizin**
4. Bei fehlender Diagnose wird, je nach Angabe, mit dem/der zuweisenden Arzt/Ärztin bzw. Patient/in verrechnet.
5. Bitte beachten Sie, dass **14 Tage vor der Blutentnahme keine immunsupprimierenden (zytostatischen) Medikamente** eingenommen werden dürfen, da dies zu nicht auswertbaren Ergebnissen führen kann.



Probenmaterial

Bitte verwenden Sie unsere speziellen Quantiferon Abnahmeröhrchen.

Ein Set (pro PatientIn) besteht aus je 1 Röhrchen mit **grauem, grünem, gelbem und lila** Verschluss.





»» Röhrchen und Abnahme

1. Bitte beachten Sie, dass Sie **alle 4 Röhrchen des Sets** verwenden müssen. Das **lila Röhrchen** des Sets ist **kein herkömmliches Blutbild- oder Blutgruppenröhrchen!** Bitte verwenden Sie für die Quantiferonbestimmung ausschließlich die im Set enthaltenen Röhrchen.
2. Wir empfehlen, vor dem ersten Quantiferonröhrchen ein anderes Röhrchen zu verwenden oder das Schlauchsystem zu entlüften. Quantiferonröhrchen **dürfen nicht unterfüllt** werden!
3. Unmittelbar nach der Befüllung die Röhrchen bitte **10-mal gut kippen (nicht schütteln)**, sodass die Innenwand ganz mit Blut bedeckt ist. Erst dann können sich die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen.

Lagerung und Transport

1. Bitte den **Zeitpunkt der Blutentnahme am Begleitschein vermerken** und die Röhrchen **bei Zimmertemperatur stehend** und ausschließlich **in der Quantiferon-Probentransportbox lagern**.
2. Bitte **pro Patient** (und somit pro 4-er Röhrchen Set) **einen Probenbegleitschein** beilegen.
3. Die Röhrchen sollten bitte **binnen 16 Stunden** ab der Blutentnahme **im Labor einlangen**.
4. Bitte beachten Sie, dass wir die Quantiferon-Röhrchensets nicht lagernd haben. Die Lieferzeit dafür beträgt etwa eine Woche.
5. Bitte beziehen Sie die Materialien über unseren Medizinproduktepartner **Meditec** unter **+43 2742 258 958** oder im **Online-Shop: www.meditec.at**
6. **Röhrchenset:**
Artikelnummern: 0103000 // 0103001 / 0103002 // 0103003
Materialnummern: HEP16, HEP17, HEP18, HEP19
7. **Probentransportbox:**
Artikelnummer: 0103006

