


## Gebrauchsanweisung für CALEX® Cap

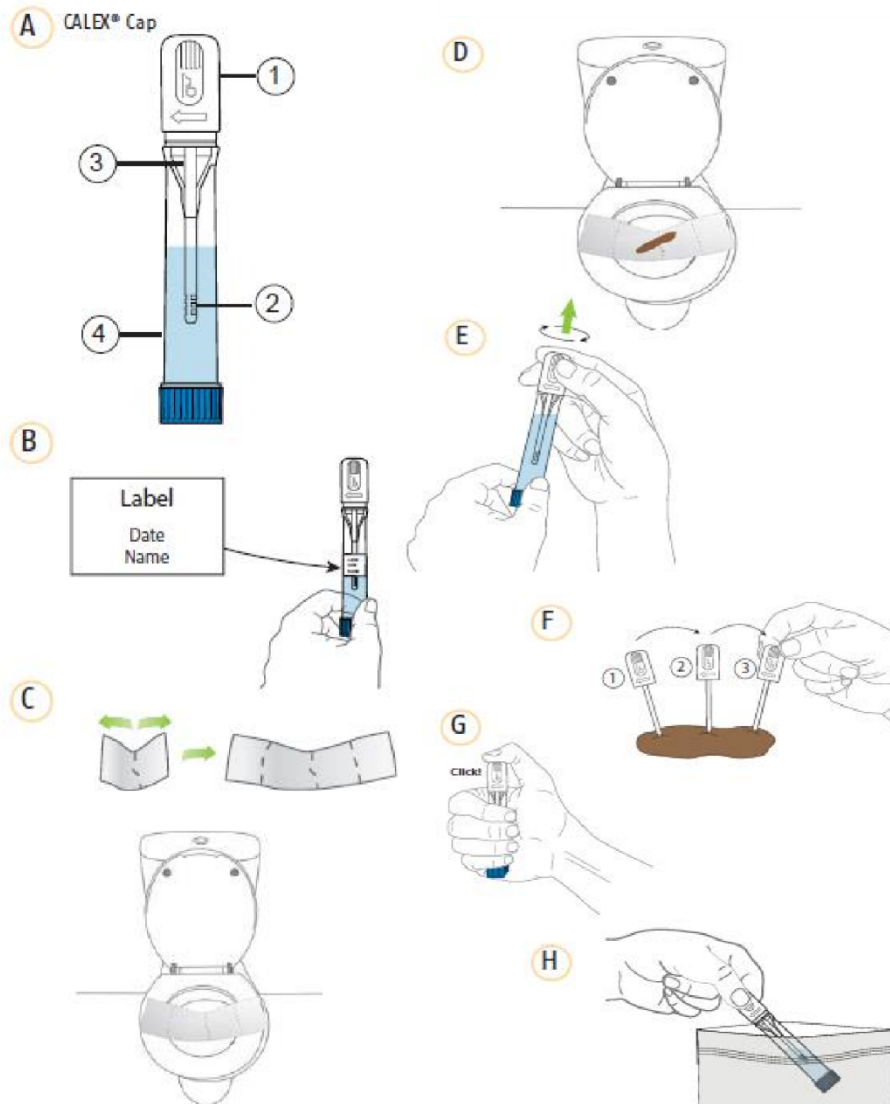

### VORGESCHLAGENER ANWENDUNGSZWECK

Das CALEX® Cap Collection Set ist für die Stuhlsammlung, die Probennahme, die Verdünnung in Extraktionspuffer zuhause bestimmt.

### VORSICHTSMAßNAHMEN UND WICHTIGE HINWEISE

Das Extraktionsröhrchen darf nach dem Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

Das Extraktionsröhrchen kann bei Raumtemperatur versendet werden.

Das Extraktionsröhrchen darf nicht wieder verwendet werden.

Wenn Sie Probleme haben die Stuhlprobe zu sammeln, beispielsweise weil der Stuhl nicht an den Rillen des CALEX® Cap haften bleibt, führen Sie den Test bitte an einem anderen Tag durch. Verwenden Sie dazu ein neues CALEX® Cap Collection Set.

### ANLEITUNG

1. Leeren Sie falls nötig zunächst Ihre Blase, da Urin das Testergebnis verfälschen kann.
2. Beschriften Sie das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen mit Datum und Namen (B).
3. Öffnen Sie das Stuhlsammelpapier, indem Sie es vorsichtig an den offenen Enden auseinanderziehen (C). Platzieren Sie das Stuhlsammelpapier indem Sie es am hinteren Teil des Toilettensitzes befestigen (C).
4. Stellen Sie sicher, dass das Stuhlsammelpapier korrekt auf dem Toilettensitz befestigt ist.
5. Stellen Sie sicher, dass die Stuhlprobe auf dem Stuhlsammelpapier aufgenommen wird (D).
6. Halten Sie das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen aufrecht und entnehmen Sie den weißen Dosierstab (A,1), indem Sie ihn gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen und aufwärts ziehen (E).
7. Stecken Sie die Dosierspitze (A,2) mit den Rillen (F) in die Stuhlprobe, drehen Sie den Dosierstab (A,1) und entnehmen Sie ihn danach wieder. Wiederholen Sie diese Schritte an 3-5 verschiedenen Stellen der Stuhlprobe, um die Rillen komplett zu füllen (F).

**ACHTUNG:** Das Papier darf nicht mit Spülwasser der Toilette in Berührung kommen.

**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die Rillen komplett mit Stuhl gefüllt sind. Es spielt keine Rolle, wenn die Dosierspitze des Dosierstabs vollkommen mit Stuhl bedeckt ist. Der überflüssige Stuhl wird im nächsten Schritt abgestreift.

8. Der Dosierstab (A,1) wird anschließend über die Einführhilfe (A,3) in das Extraktionsröhrchen (A,4) zurückgesteckt und in die endgültige Verschlussposition gedrückt. Sie fühlen und hören ein „Klick“ (G).

**HINWEIS:** Nachdem die Stuhlprobe gesammelt wurde, können Sie den restlichen Stuhl zusammen mit dem Stuhlsammelpapier wegspülen.

9. Schütteln Sie das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen kräftig mindestens 5 Sekunden.

10. Legen Sie das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen in den wiederverschließbaren Beutel (H) und bringen Sie es sobald wie möglich zu Ihrem Arzt zurück.

Wenn Sie die Probe nicht am selben Tag zurückgeben können, lassen Sie sie verpackt bis zum Folgetag in Ihrem Kühlschrank.